


MASQUES À
USAGE UNIQUE


Temps de port
limité à 4h



appmask.eu
contact@appmask.eu

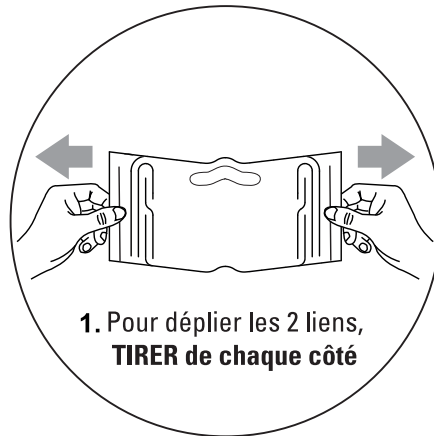

1. Pour déplier les 2 liens,
TIRER de chaque côté

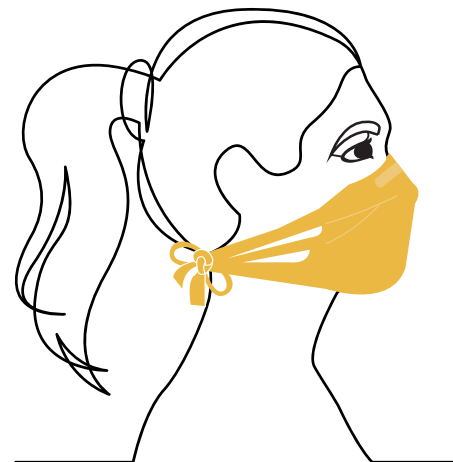

2. Placez votre masque sur le nez,
passez les liens sous les oreilles
3. puis faire un noeud

FABRICATION

Composition de la matière principale : 100% polyester
Performances : Masque barrière selon la norme AFNOR Spec S 76-001

Masque Catégorie UNS1 : masque à usage des professionnels en contact avec le public.
Efficacité de filtration des particules de 3µm > 90%
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa.

Selon le protocole d'essai de la direction générale pour l'armement (DGA) diffusé par lettre du 25 mars 2020

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est important de respecter cette notice d'utilisation.

- Portez ce masque lorsque vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre nez et votre bouche.
- Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes).
- Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.

- Lorsque l'on porte un masque, éviter de le toucher, ne pas déplacer le masque.
- Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- Si besoin de boire ou de manger, changer de masque.
- Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque.
- Pour retirer le masque : si port de gants, les retirer et se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique. Puis, enlever le masque par derrière (ne pas toucher le devant du masque) le jeter immédiatement dans une poubelle fermée, se laver les mains de nouveau.

COMMENT POSER SON MASQUE

1. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
2. N'extraire qu'un seul masque de l'emballage, le saisir et tirer vers le bas pour l'extraire du dévidoir.
3. Puis tirer vers le haut pour le détacher.
4. Une fois le masque détaché dérouler les liens.
5. Positionner l'antidérapant sur le nez, passer les liens sous les oreilles puis faire un nœud sur la nuque en ajustant la tension.

FABRIQUÉ ET CONÇU
EN FRANCE



Pour récupérer le premier masque, ouvrez le carton en tirant sur les deux oreilles présentes de chaque côté. Soulevez le triangle, engagez le 1er masque, puis refermez le carton. Ensuite, il n'est plus utile d'ouvrir le carton.